



Használati útmutató

CO-CN-01/A egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil szájmaszk, mosható, többször felhasználható

Tárolási követelmények:

Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év

Ártalmatlanítás, megsemmisítés:

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

Gyártó:

- Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 21456891-2-16
- Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
- Telefonszám: +36-56-521-012
- E-mail: contact@contactnft.hu

A termék anyaga, kezelése:

- Alapanyagok: Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), cérna, gumizsinór, merevítő
- Mosás: Mosható 90°C hőmérsékleten. Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa. Vegyi úton tisztítható.
- Vasalás: Vasalható 240°C hőmérsékleten.

Használati útmutató:

- Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
- Első használat előtt 90°C hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
- Felhelyezés előtt fertőtlenítse kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
- Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és cseréljen maszkot.
- Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
- A maszk levétele előtt fertőtlenítse kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90°C hőmérsékleten
- Amennyiben a termék szűrőpárnával rendelkezik, a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. **A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!**

PM2.5 Szűrőbetét:

A Texmax szájmaszkok megvásárolhatóak olyan kialakítással, hogy alkalmasak legyenek PM2.5 szűrőbetét behelyezésére. Ezek a szűrőbetétek a maszkkal együtt rendelhetőek. Szűrőbetétek utólag is megvásárolhatóak a webshopban.

A PM2.5 olyan szűrő betét, amely a 2.5 mikronnál nagyobb részecskéket kiszűri a belélegzett levegőből. A szálló por és a szennyezett levegő megszűrésére alkalmas, a 2.5 mikronnál nagyobb ártalmas részecskéket nem engedi a tüdőbe jutni. Ezek azok a porszemcsék, amik szmogos, városi levegőben ingerelhetik a nyálkahártyát és köhögést okozhatnak. A PM2.5 szűrőpárna aktív szenes filtert tartalmaz, így idővel telítődik a kiszűrt részecskével. A legnagyobb védelem és hatékonyság érdekében a **PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!** A Texmax szájmaszk kialakítása lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében.

Használat előtt olvassa el a termék Biztonsági Adatlapját és EU Megfelelőségi Nyilatkozatát a www.contactnft.hu vagy www.texmax.hu weboldalakon!



Használati útmutató

CO-CN-01/B egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil és poliészter anyagú szájmaszk, mosható, többször felhasználható

Tárolási követelmények:

Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év

Ártalmatlanítás, megsemmisítés:

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

Gyártástechnológia:

A CO-CN-01-1/2020/B jelű kétrétegű szájmaszk külső oldala nyomtatott poliészter alapanyagból, belső, arc felőli oldala 100%-os egészségügyi pamut textiltől készül. Felhasználáskor ügyeljen arra, hogy a maszk pamut alapanyagú fehér oldala legyen az arc oldalán.

Gyártó:

- Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 21456891-2-16
- Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
- Telefonszám: +36-56-521-012
- E-mail: contact@contactnkft.hu

A termék anyaga, kezelése:

- Alapanyagok: Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), poliészter, cérna, gumizsinór.
- Mosás: Mosható 60°C hőmérsékleten.
- Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa
- Vegyi úton nem tisztítható
- Szárítógépben nem szárítható.
- 150 °C-on vasalható

Használati útmutató:

- Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
- Első használat előtt 60°C hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
- Felhelyezés előtt fertőtlenítsen kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára.
- Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és cseréljen maszkot.
- Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
- A maszk levétele előtt fertőtlenítsen kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 60°C hőmérsékleten.
 - Amennyiben a termék szűrőpárnával rendelkezik, a PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. **A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!**

PM2.5 Szűrőbetét:

A Texmax szájmaszkok megvásárolhatóak olyan kialakítással, hogy alkalmasak legyenek PM2.5 szűrőbetét behelyezésére. Ezek a szűrőbetétek a maszkkal együtt rendelhetőek. Szűrőbetétek utólag is megvásárolhatóak a webshopban.

A PM2.5 olyan szűrő betét, amely a 2.5 mikronnál nagyobb részecskéket kiszűri a belélegzett levegőből. A szálló por és a szennyezett levegő megszűrésére alkalmas, a 2.5 mikronnál nagyobb ártalmas részecskéket nem engedi a tüdőbe jutni. Ezek azok a porszemcsék, amik szmogos, városi levegőben ingerelhetik a nyálkahártyát és köhögést okozhatnak. A PM2.5 szűrőpárna aktív szén



filtert tartalmaz, így idővel telítődik a kiszűrt részecskékkel. A legnagyobb védelem és hatékonyság érdekében a **PM2.5 szűrőpárnát 40 óra viselés után cserélje le. A PM2.5 szűrőpárna nem mosható. Mosás előtt vegye ki a maszkból a szűrőpárnát!** A Texmax szájmaszk kialakítása lehetővé teszi a gyors és egyszerű cserét a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében

Használat előtt olvassa el a termék Biztonsági Adatlapját és EU Megfelelőségi Nyilatkozatát a www.contactnkft.hu vagy www.texmax.hu weboldalakon!